

Principaux avantages de SmoothEye®

- Fraîcheur et fermeté immédiates
- Convalescence minimale, voire aucune
- Minimalement invasif, doux et rapide
- Sûr et précis



Avant et après



Avec l'aimable autorisation
de H. Shiffman, MD



Avec l'aimable autorisation
de A. Villalobos, MD



FOEYEPT-F

Fotona
choose perfection

SmoothEye

Traitement au laser pour le raffermissement
et la réduction des rides autour des yeux



Qu'est-ce que SmoothEye® ?

SmoothEye® est un traitement au laser qui retend la peau lâche et vieillissante des paupières et de la zone environnante, améliorant ainsi l'élasticité et la structure générale de la peau. Il réduit les rides, les poches et les cernes autour des yeux et donne des résultats d'apparence naturelle, et ne requiert qu'une très courte convalescence, voire aucune.

Comment cela fonctionne-t-il?

SmoothEye® utilise le mode révolutionnaire SMOOTH® de Fotona, qui traite la peau à la manière d'une « plume » grâce à un dépôt de température contrôlé avec précision. Le chauffage intense et contrôlé des tissus de surface stimule le remodelage du collagène et initie la production de nouveau collagène.

Des résultats prouvés et un taux de satisfaction élevé

Après quelques séances, vous pouvez constater une réduction des rides autour des yeux, une amélioration de l'élasticité de la peau et une apparence généralement plus jeune. Trois séances espacées d'environ un mois sont recommandées. L'effet est visible immédiatement après le premier traitement, tandis que les résultats complets peuvent être observés environ 4 à 6 mois après le dernier traitement.

Comment se déroule le traitement ?

Le traitement SmoothEye® dure généralement de 10 à 15 minutes. Un anesthésique topique peut être appliqué avant la procédure, et vous pouvez ressentir une légère chaleur et une sensation de picotement. Après le traitement, il est recommandé d'appliquer une crème hydratante et un écran solaire sur la zone traitée. Le traitement est très bien toléré par les patients, aucun inconfort n'est décrit, et ne nécessite qu'une très courte convalescence.

Avant et après



avant

Avant le traitement SmoothEye®



après

6 semaines après le 1^{er} traitement



après

6 semaines après le 2^e traitement



après

8 semaines après le 3^e traitement